

Posey Fallskyddsmatta

Enkla försiktighetsåtgärder kan hjälpa till att skapa en säker miljö. Posey Fallskyddsmatta hjälper till att minimera skador till följd av ett fall, samtidigt som den ger en stabil och halkfri yta för den boende att gå på.

Maximalt skydd

Tillverkad i unikt 2,5 cm tjockt Etylenvinylacetat (EVA) skum är fallskyddsmattan i konformitet med den amerikanska ASTM-standarderna för stötupptagning.

För att få en större yta med skydd, kan man enkelt koppla ihop två mattor.

Fäst bara ihop de två raka sidorna på två fallskyddsmattor med de medföljande kardborrebanden. Det 2,5 cm tjocka EVA-skummet ger en låg profil att gå på, och med den fasade kanten kan man lätt ta sig upp på mattan med en rullstol, rollator eller ett rullbord och för personer med hasande gång underlättar också den fasade kanten.

Med en antihalkbeläggning på undersidan av mattan förebygger man också halkning då man skall kliva upp på mattan.

Enkel rengöring

Vinylöverdraget torkas enkelt av med en fuktig trasa och vanligt rengöringsmedel, om så behövs kan även flytande desinfektionsmedel eller sprit användas för desinfektion.

Då mattan inte används kan den vikas ihop i tre delar för enkel kompakt lagring.

I hopvikt form tar den fasade mattan upp en yta av 60 x 97 x 7,5 cm (B x L x H)

OBS! Mattan bör förvaras upphängd eller liggande när den inte används. Detta för att förhindra kanterna att vikas eller böjas.


Ett kardborreband håller mattan i hopvikt läge och ett bärhandtag gör det enkelt att flytta mattan.

Hjälper till att minimera användandet av sänggrindar

Fallskyddsmattan hjälper till att skydda den boende/sängliggande från fallrelaterade skador.

Användningsinstruktioner

1. Lossa kardborrebandet och vik upp fallskyddsmattan.
2. Placera fallskyddsmattan längs med och tätt intill sängens långsida. De fasade kanterna skall läggas ut mot rummet och den släta kanten skall läggas in mot sängen!
Försäkra er om att "This Side Down" etiketten läggs nedåt mot golvet
3. För att sätta ihop två mattor, klistra fast en del av det självhäftande kardborrebandet på alla tre sektioner av den raka kanten på ena mattan. Klistra sedan den andra delen av kardborrebandet på den andra mattans tre delar så att de kan fästas vid varandra.
4. Före lagring, torka först ren mattan med en fuktig trasa om så behövs, låt den sedan torka ordentligt!
Vik ihop mattan och sätt ihop kardborrebandet.

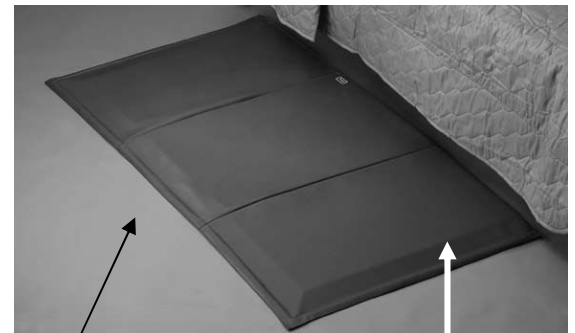

De fasade kanterna ut mot rummet!

Den släta kanten in mot sängen!

OBS!

Försäkra er om att "This Side Down" etiketten läggs mot golvet. Informera den boende och vårdgivare om att fallskyddsmattan används, och att försiktighet skall iakttas då man kliver upp eller ned på mattan för att undvika snubbling.



Två mattor kan sättas ihop för att få en större skyddande yta.

6027

WARNING!

När fallskyddsmattan används tillsammans med en låg säng, se till att lämna tillräckligt med plats mellan sängen och mattan för att förhindra att delar på sängen river hål i mattan då den manövreras.



6027R

Fallskyddsmattan finns också i en variant med efterlysande kant (6027R) Denna "laddas" av ljuset från lampan i rummet eller dagsljuset från fönstret. När man sedan mörklägger rummet lyser kanten och visar var mattan finns. Tack vare detta är det lätt för personal att se var mattan ligger även i mörker samtidigt som en boende lätt kan orientera sig tillbaka till sängen efter ett toalettbesök utan att behöva tända lampan.

Almedo AB
Björkvägen 10
182 46 ENEBYBERG

Tel: 08/758 25 70
Fax: 08/758 11 25
E-post: info@almedo.se